



**Складана рампа, 5"**

**JBS316**

**Інструкція з експлуатації**



Дякуємо, що обрали нашу продукцію.  
Уважно ознайомтеся з цією інструкцією та дотримуйтесь її під час використання.



**Цей пристрій відповідає стандарту європейської Директиви 93/42/ЄЕС**

## ЗМІСТ

1. Вступ.....	3
2. Заходи безпеки .....	3
3. Технічні характеристики.....	4
4. Загальна характеристика.....	4
5. Технічне обслуговування і догляд.....	5
6. Належна утилізація продукту .....	5
7. Відомості про сертифікацію.....	6
8. Умови гарантії .....	7

## 1. Вступ

Дякуємо, що надали перевагу нашій продукції. Будь ласка, уважно ознайомтесь з цією Інструкцією та дотримуйтесь її під час використання виробу.



**Не використовуйте пандус, не ознайомившись з Інструкцією.**

**Не використовуйте пандус у випадку його пошкодження.**

**Не намагайтеся внести зміни до конструкції виробу.**

ТМ «OSD» гарантує використання високоякісних матеріалів та контроль виробництва на усіх його стадіях.

Складна рампа для інвалідного візка «JBS316» (далі за паспортом – пандус / виріб / пристрій / обладнання) – це похила поверхня, що дублює сходи, збудована на підставі ДБН В.2.2-9-99 для пересування осіб, які користуються колісними кріслами. Використовується на вулиці та у різних медичних установах.

Пандус для інвалідного візка «JBS316» розроблено для максимальної зручності та безпеки користувача.



**Виробник залишає за собою право без попереднього повідомлення змінювати будь-які технічні характеристики, зазначені у цій Інструкції. Усі дані, зазначені у Інструкції, наведені для ознайомлення.**

Даний виріб відповідає вимогам європейської Директиви 93/42/ЄЕС виробів медичного призначення.

## 2. Заходи безпеки

ТМ «OSD» не гарантує безпеку користувачеві та правильне функціонування пандуса за умов, якщо будь-який з оригінальних компонентів був змінений або замінений на неоригінальний.

1. Перед використанням **УВАЖНО** ознайомтесь з Інструкцією.
2. Перед кожним використанням **ПЕРЕВІРЯЙТЕ** загальний технічний стан виробу. Не використовуйте його у випадку виявлення пошкоджень.
3. Максимально допустиме навантаження на підйомник становить – 268 кг. **НІКОЛИ** не перевищуйте допустимий ліміт ваги!
4. Кожні два роки слід **ПРОВОДИТИ** повний кваліфікований технічний огляд пандусу.
5. Під час підйому / спуску пацієнта **УНИКАЙТЕ** різких рухів та розгойдування.
6. Під час підйому / спуску пацієнта **ЗВЕРТАЙТЕ УВАГУ** на те, щоб рухи його тіла не були обмежені.

### 3. Технічні характеристики

Параметр	Значення
Модель:	JBS316
Матеріал:	алюміній (AL6061)
Довжина, (см):	150
Ширина, (см):	12,7
Довжина у складеному вигляді, (см):	72
Внутрішня ширина, (см):	27
Зовнішня ширина, (см):	37
Вага, (кг):	11
Максимальне навантаження, (кг):	268
Гарантійний термін, (міс.):	12

### 4. Загальна характеристика



Перевіряйте справність пандуса перед кожним використанням, якщо виріб використовується не регулярно, то оглядайте його мінімум раз на шість місяців. У разі поломки або несправності, пошкодженнь або розривів одного або декількох деталей, не використовуйте виріб.

Особливості пандуса «JBS316»:

- ✓ Міцний складаний пандус для подолання пагорбів і сходинок, полегшує спуск інвалідного візка з автомобіля.
- ✓ Ребриста поверхня пандуса забезпечує плавний з'їзд і підйом, запобігає ковзанню.
- ✓ Обладнаний обмежувальними бортами по боках для безпечного з'їзду.

- ✓ Завдяки конструкції, що складається, виріб зручно переносити і транспортувати у машині.
- ✓ У складеному вигляді пандус не займає багато місця для зберігання.

## 5. Технічне обслуговування і догляд

За умов забруднення пристрою його поверхню можна обробляти неагресивними миючими та дезінфікуючими засобами, уникаючи рухливих частин та елементів. Щоразу перед початком експлуатації слід візуально оглянути пристрій на наявність пошкоджень. У разі сумнівів не використовуйте пристрій і не намагайтеся полагодити самостійно. Зверніться до місцевого дилера або до місця придбання товару за подальшими інструкціями.

Зовнішню поверхню пандуса обробляйте дезінфікуючими засобами, зареєстрованими та дозволеними в Україні для дезінфекції поверхонь за режимами, регламентованими діючими документами стосовно застосування дезінфікуючих засобів, затвердженими в установленому порядку.

Завжди тримайте пандус у чистоті для використання протягом тривалого терміну. Очищайте за допомогою води та миючих засобів. Не використовуйте розчинники та абразивні препарати. Протирайте ганчіркою після кожного використання.


**ПРИМІТКА:** Підприємство-виробник систематично веде роботи з поліпшення конструкції підйомника, тому можливі деякі зміни, не зазначені в Інструкції.

<sup>1</sup> Цей прилад ТМ «OSD» виготовлено в умовах застосування системи суворого контролю якості.

<sup>2</sup> Пандус для інвалідного візка «JBS316» відповідає технічним умовам і визнаний придатним для експлуатації.

## 6. Належна утилізація продукту

Цей символ на приладі або в паспорті до нього вказує, що даний продукт не підлягає утилізації разом з іншими побутовими відходами після закінчення терміну служби. Для запобігання можливої шкоди для навколишнього середовища або здоров'я людини через неконтрольовану утилізацію відходів, будь ласка, відокремте цей прилад від інших типів відходів і утилізуйте його належним чином для раціонального повторного використання матеріальних ресурсів.

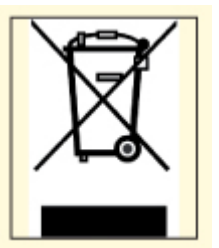

Даний продукт не містить ніяких шкідливих речовин.

## 7. Відомості про сертифікацію

Виріб «JBS316» відповідає технічним вимогам і визнаний придатними для експлуатації.



**Виробник:** Foshan Shunde A&I Industries Ltd./ Фошан Шунде А енд І  
Індастріс Лтд.

Lien Tu Industry Park, Le Liu, Shun Te City, Kwantung, China / Ліен Ту  
Індастрі Парк, Ле Ліу Шун Те Сіті, Квантунг, Китай.

**Уповноважений представник виробника в Україні:** ТОВ «ОСД Східна  
Європа»; адреса: Україна, 03127, м. Київ, пр. 40-Річчя Жовтня, 100/2.

**Номер редакції:** № 2 від 21.01.2020.

**Дата виготовлення:** див. на упаковці.

Гарантійний термін на **виріб «JBS316»** – 1 рік з дати продажу за умови виконання вимог  
Інструкції.

На частини, які швидко зношуються, гарантія не поширюється.

Доставка у сервісний центр та зворотня доставка здійснюється за рахунок клієнта.





## 8. Умови гарантії

ТОВ «ОСД Східна Європа» гарантує відсутність заводських дефектів і роботу пристрою протягом гарантійного терміну 12 місяців з дати купівлі при дотриманні правил експлуатації виробу викладених у Інструкції.

1. Гарантійний ремонт проводиться **тільки** протягом гарантійного терміну.
2. Виріб знімається з гарантії у наступних випадках:
  - а) порушення правил експлуатації, викладених в Інструкції;
  - б) за наявності ознак стороннього втручання (спроба самостійного ремонту виробу);
  - в) якщо пристрій використовувався не за призначенням.
3. Гарантія не розповсюджується на:
  - а) механічні пошкодження чи пошкодження внаслідок транспортування;
  - б) пошкодження, які викликані потраплянням до виробу сторонніх предметів, речовин, рідин тощо;
  - в) пошкодження, які викликані побутовими факторами, зовнішніми діями (перепади напруги у мережі), неправильне підключення пристрою.
4. Споживач має право на обмін товару належної якості протягом 14 (чотирнадцяти) днів, не враховуючи дня купівлі згідно зі статтею 9 Закону України «Про захист прав споживачів»:

*Обмін товару належної якості проводиться за умови, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд (складений в заводську упаковку), споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом із проданим товаром.*

**УВАГА: Артикул, технічні характеристики, колір, зовнішній вигляд та комплектація виробів можуть бути змінені виробником без попередження.**

Дата продажу: \_\_\_\_\_

Підпис/Печатка: \_\_\_\_\_