



Коляска стандартна складана

OSD-MK2218

Інструкція з експлуатації



Дякуємо, що обрали нашу продукцію.
Уважно ознайомтеся з цією інструкцією та дотримуйтесь її під час використання.



Цей пристрій відповідає стандарту європейської Директиви 93/42/ЄЕС

ЗМІСТ

1.	Вступ.....	3
2.	Заходи безпеки	3
3.	Технічні характеристики.....	3
4.	Комплектація	4
5.	Порядок збору коляски	5
5.1.	Розкладання коляски.....	5
5.2.	Кріплення секції сидіння.....	5
5.3.	Збір балдахіна	5
5.4.	Складання коляски та регулювання кута нахилу сидіння.....	6
5.5.	Збір подушки для сидіння	6
5.6.	Збір ременя безпеки.....	7
6.	Використання	8
6.1.	Регулювання ручки.....	8
6.2.	Регулювання балдахіна	8
6.3.	Поворот сидіння	8
6.4.	Регулювання кута нахилу спинки.....	9
6.5.	Регулювання висоти спинки.....	9
6.6.	Фіксація ременів безпеки і абдуктора.....	10
6.7.	Регулювання ширини та глибини сидіння	10
6.8.	Встановлення підголівника	11
6.9.	Регулювання кута нахилу і довжини підніжки	11
6.10.	Гальма	11
7.	Відомості про сертифікацію.....	12
8.	Умови гарантії	13

1. Вступ

Дякуємо, що надали перевагу нашій продукції. Будь-ласка уважно ознайомтесь з цією інструкцією і дотримуйтесь її під час використання виробу.



УВАГА

Не використовуйте коляску, не ознайомившись з інструкцією.

Не використовуйте коляску у випадку її пошкодження.

Не намагайтеся внести зміни до конструкції виробу.

ТМ «OSD» гарантує використання високоякісних матеріалів та контроль виробництва на усіх його стадіях.

2. Заходи безпеки

Перед початком використання коляски або під час використання після тривалого зберігання переконайтеся, що всі частини коляски закріплені та міцно зафіксовані. Регулярно перевіряйте загальний технічний стан коляски, адже усі елементи з часом зношуються.

1. **НИКОЛИ** не залишайте дитину без нагляду. **ЗАВЖДИ** тримайте коляску в полі зору, доки в ній знаходиться дитина.
2. **ЗАВЖДИ** використовуйте ремені безпеки для запобігання випаданню дитини з коляски, адже дитина може «зісковзнути» і серйозно травмуватися.
3. **ЗАВЖДИ** перед регулюванням коляски перевіряйте, чи немає ризику затиснення або пошкодження будь-якої частини тіла дитини.
4. **НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ** коляску в разі несправності або пошкодження будь-яких її компонентів.
5. **НЕ ДОЗВОЛЯЙТЕ** дитині самостійно штовхати, водити, крутити коляску або гратися нею.
6. **НЕ ДОЗВОЛЯЙТЕ** дитині стояти на підставці для ніг, коляска може перевернутися і травмувати дитину.
7. **НИКОЛИ** не залишайте коляску на пагорбі або під нахилом, навіть, якщо задіяли гальма. Ремінь безпеки може зашкодити дитині.
8. Щоб запобігти зайвих пошкодженнь, **ЗАВЖДИ** встановлюйте гальма.

ТМ «OSD» не гарантує безпеку користувачеві та правильне функціонування інвалідного візка за умов, якщо будь-який з оригінальних компонентів був змінений або замінений на неоригінальний.


3. Технічні характеристики

Параметр	Артикул
Модель	OSD-MK2218
Матеріал	алюміній
Загальна ширина, (см)	65
Загальна висота, (см)	99-118
Загальна глибина, (см)	70
Ширина сидіння, (см)	26-35,5
Глибина сидіння, (см)	28,5-34,5

Висота спинки, (см)	48,5-63,5
Ширина спинки, (см)	36,5
Довжина підніжки, (см)	21,6-34,3
Вага, (кг)	19,9
Максимальне навантаження, (кг)	50




4. Комплектація

- | | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| A. Балдахін | I. 5-точковий ремінь безпеки |
| B. Підголівник | J. Регулятор кута нахилу підніжки |
| C. Відкидна спинка сидіння | K. Важіль опускання сидіння |
| D. Абдуктор | L. Гальма |
| E. Тримач підніжки | M. Задні колеса |
| F. Регульована підніжка | N. Кошик |
| G. Переднє роликове колесо | O. Клямка для складання тенту |
| H. Регульована ручка | P. Важіль нахилу спинки |


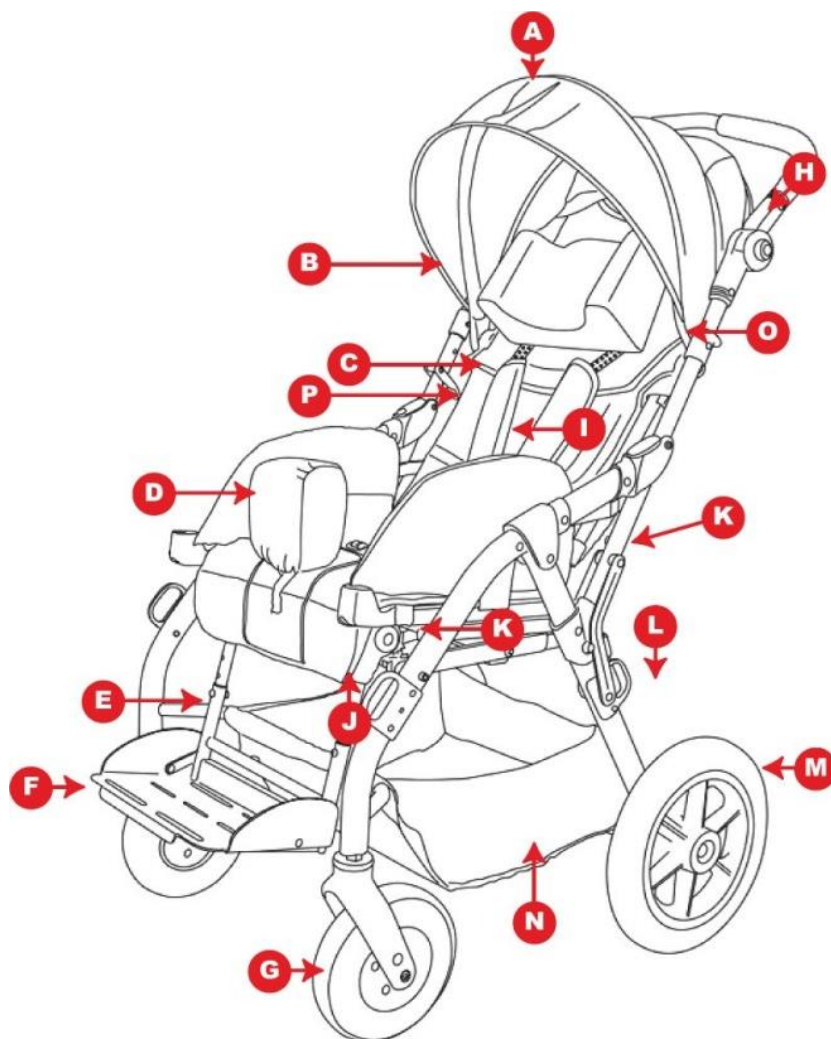


5. Порядок збору коляски

5.1. Розкладання коляски

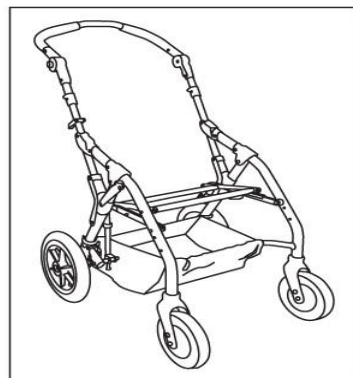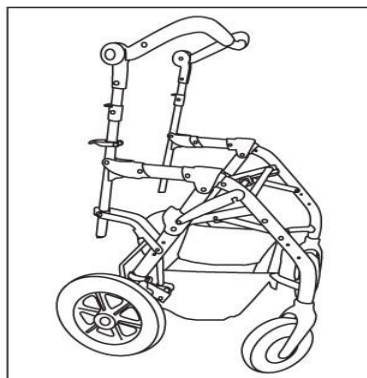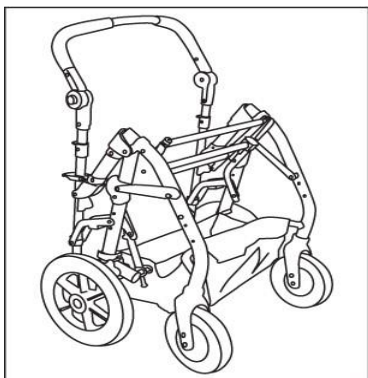

5.2. Кріплення секції сидіння


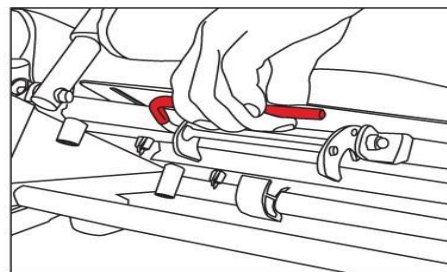
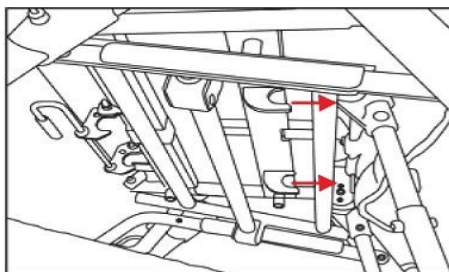


УВАГА





Переконайтеся, що секція сидіння щільно прилягає до мобільної рами.

5.3. Збір балдахіна

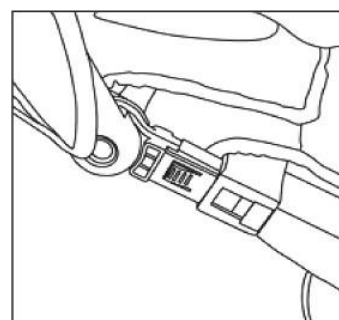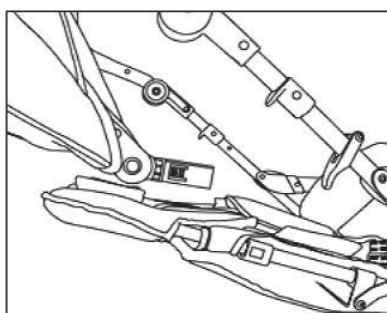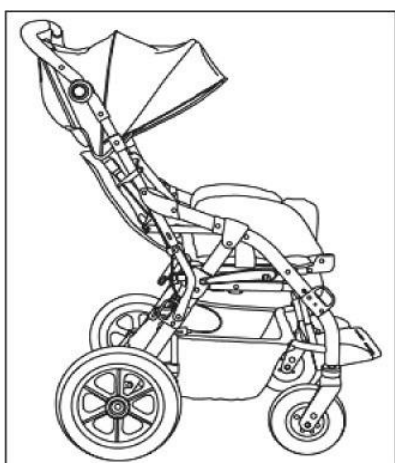

5.4. Складання коляски та регулювання кута нахилу сидіння

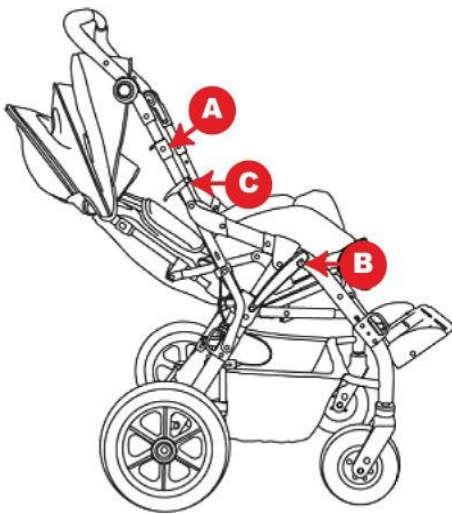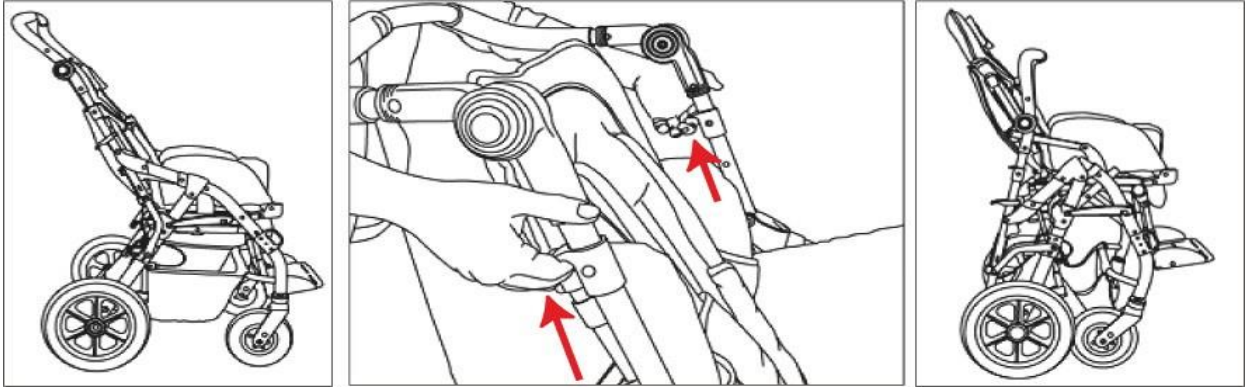


Щоб скласти коляску, необхідно зняти її з гальм та дістати дитину. Якщо балдахін прикріплений до коляски, складіть його. Висмикніть клямку А і потягніть коляску назад, поки вона повністю не складеться.



Зафіксуйте гачок В.

Щоб відрегулювати кут нахилу сидіння, потягніть за важіль опускання сидіння.

5.5. Збір подушки для сидіння





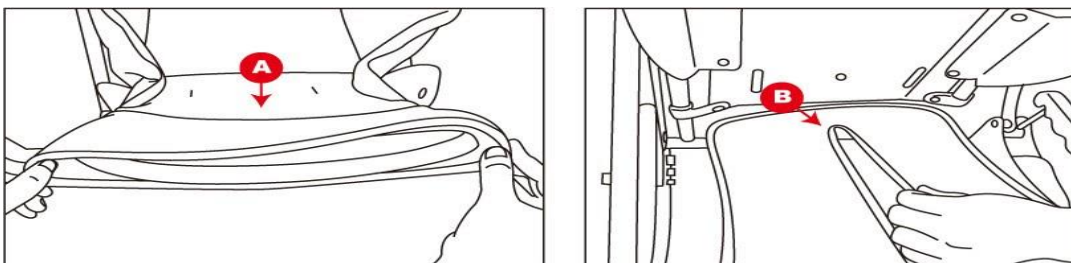


Помістіть подушку для сидіння в спинку сидіння так, щоб задня сторона проходила через нижній кінець.

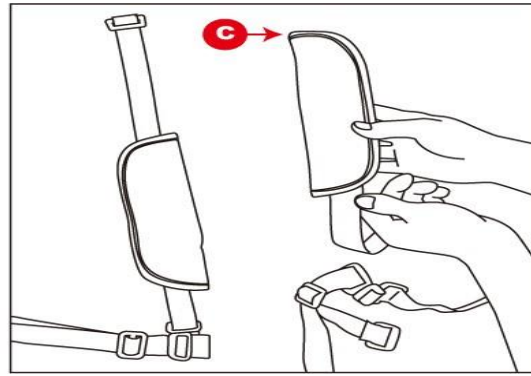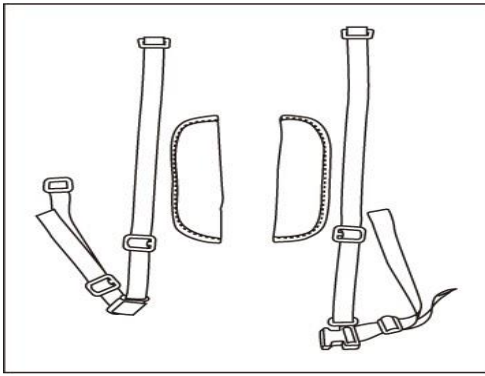

М'які чохла С протягнути в ремені.

5.6. Збір ременя безпеки

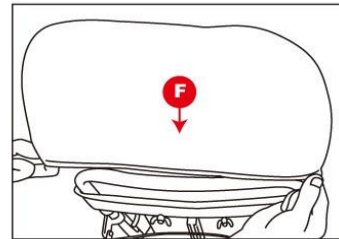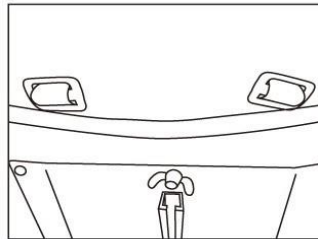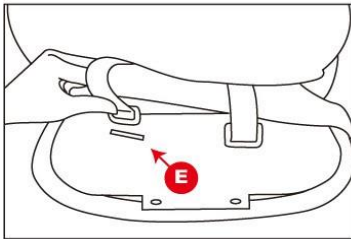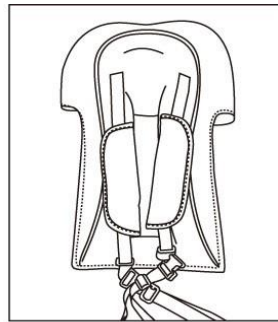
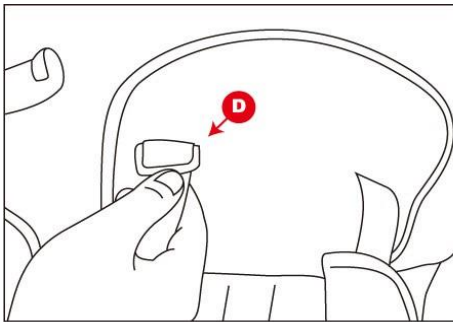


Протягнути ремені через подушку сидіння D і отвір в спинці E. Одягніть подушку F на спинку.

УВАГА



Неправильне збирання ременів і пряжок може призвести до того, що ремені будуть провисати й не будуть фіксувати дитину належним чином.

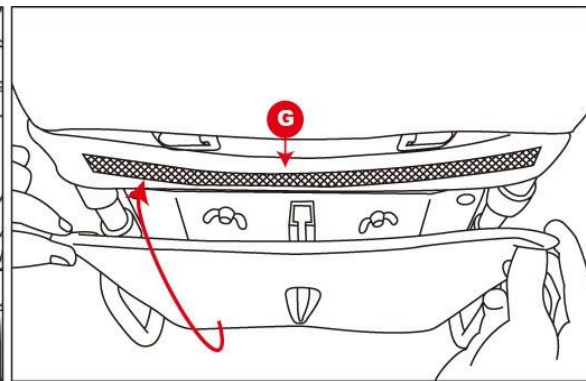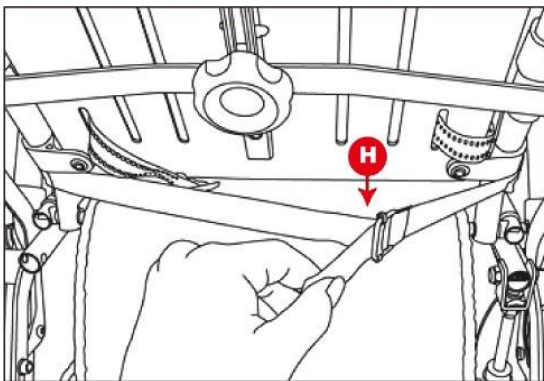


Зафіксуйте ремінь Н. Потягніть за край сидіння і прикріпіть липучку на спинці.

[7]

Офіційна веб-сторінка: osd.ua


6. Використання

6.1. Регулювання ручки

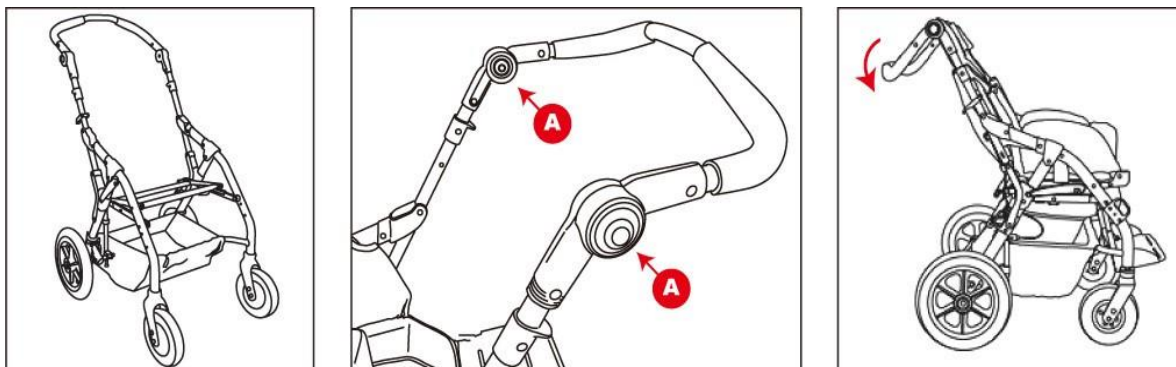

Для регулювання кута нахилу ручки натисніть кнопку А.


6.2. Регулювання балдахіна

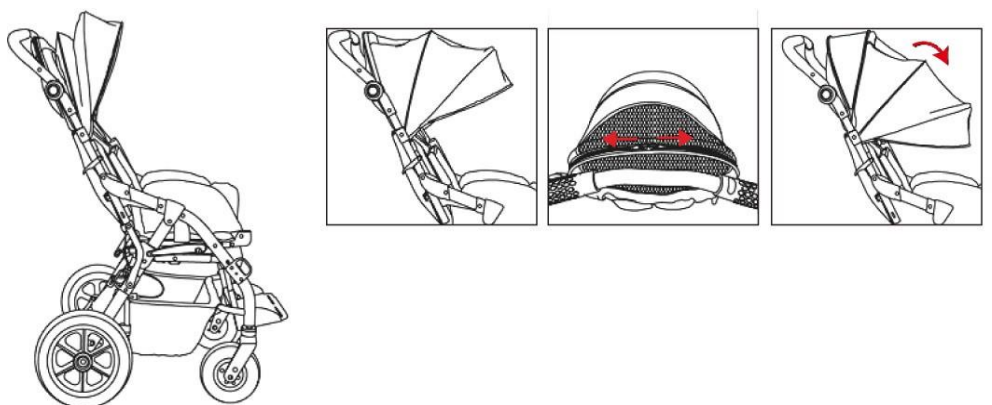

Щоб розкрити балдахін, потягніть вперед і вниз.

Щоб згорнути балдахін, потягніть назад.

6.3. Поворот сидіння

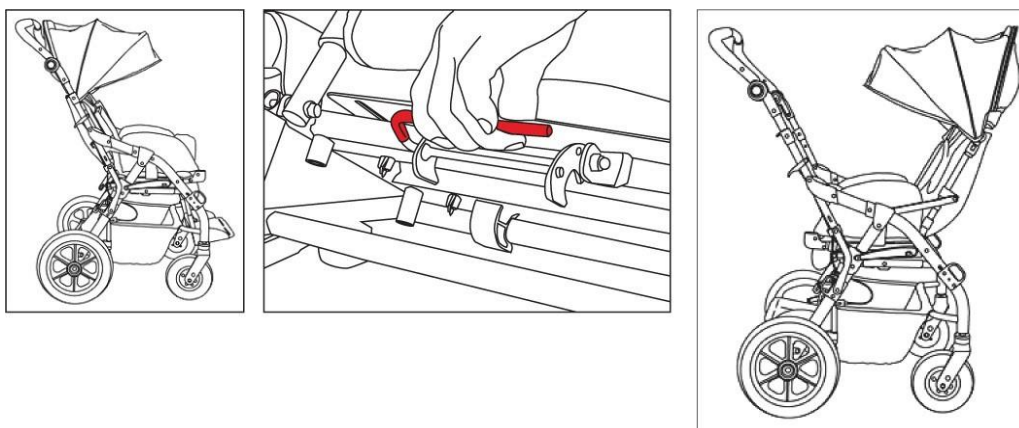


Важелем червоного кольору розблокуйте сидіння. Підніміть його і поверніть на 180°. Помістіть сидіння назад на мобільну раму та закріпіть червоний важіль.



Перш ніж повертати сидіння, дістаньте дитину з коляски.

6.4. Регулювання кута нахилу спинки

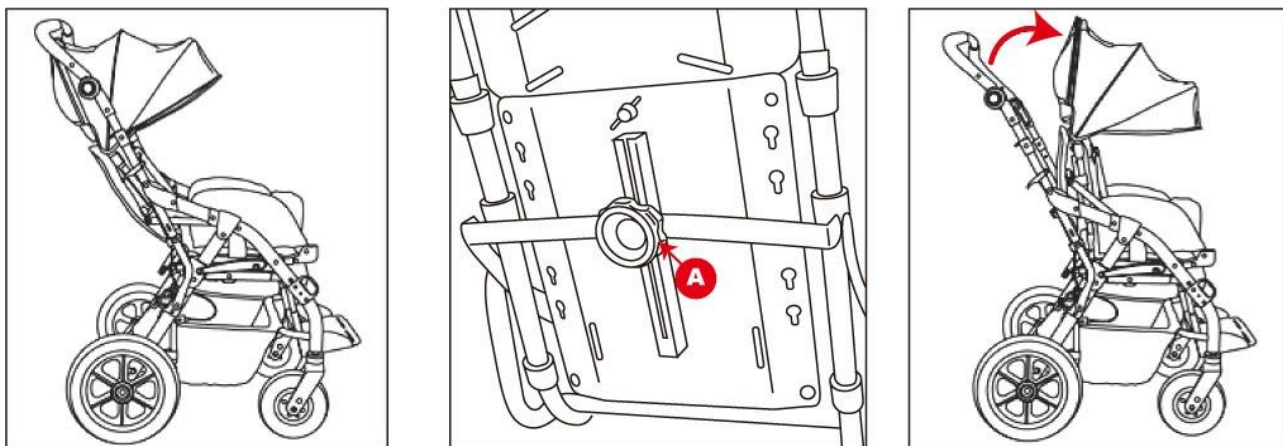


Щоб відрегулювати кут нахилу спинки, поверніть ручку А.




Під час регулювання кута нахилу спинки завжди тримайтеся за спинку.

6.5. Регулювання висоти спинки

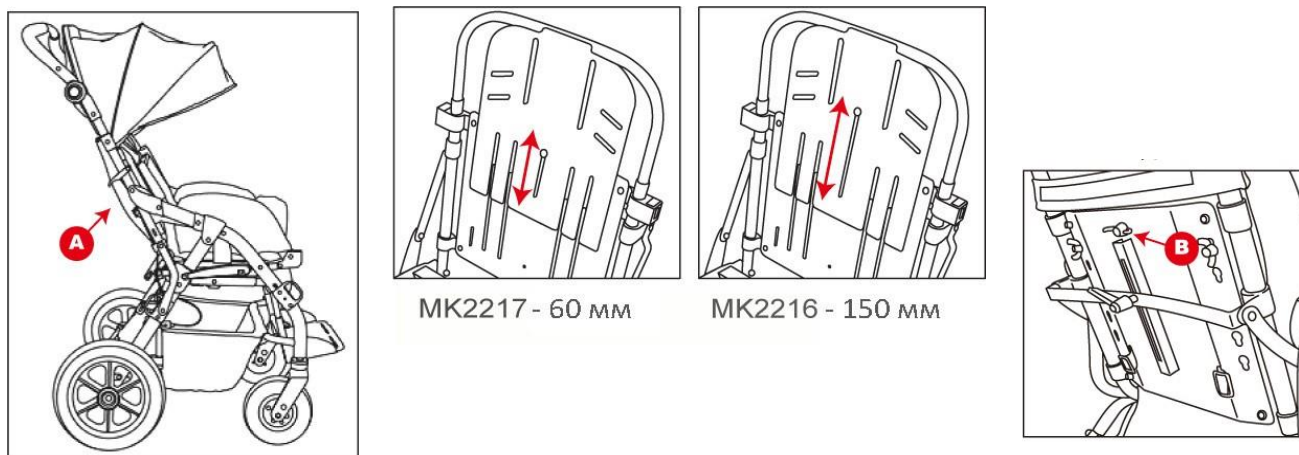

Щоб відрегулювати висоту спинки, потрібно дістати подушку А і послабити гвинт В.

6.6. Фіксація ременів безпеки і абдуктора

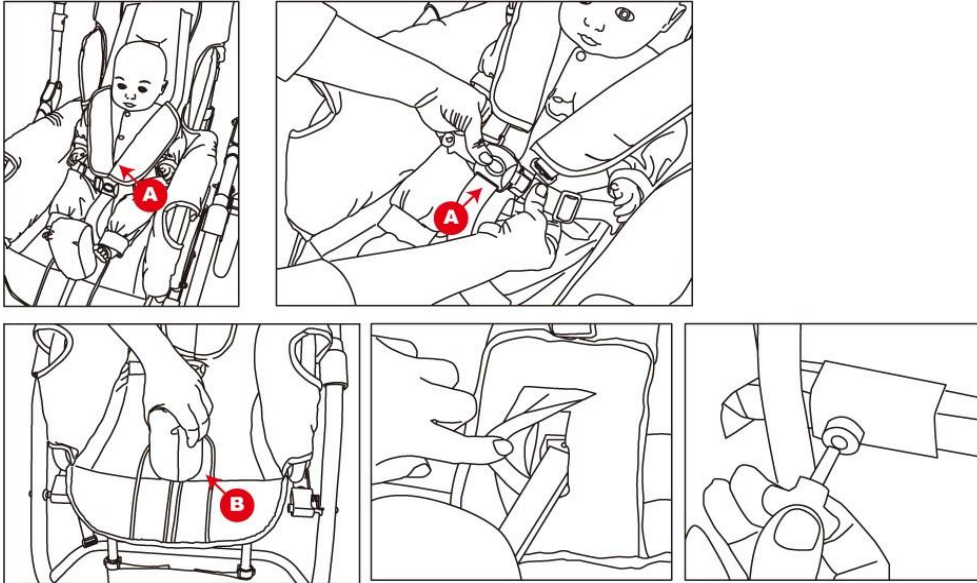


Необхідно дістати абдуктор В, посадити дитину в коляску і застібнути ремені, як показано на малюнку А. Помістіть абдуктор між ногами дитини і закріпіть його гвинтом під сидінням.

УВАГА



Ремені безпеки зможуть захистити вас від серйозних травм під час падіння. **ЗАВЖДИ** використовуйте їх.

6.7. Регулювання ширини та глибини сидіння

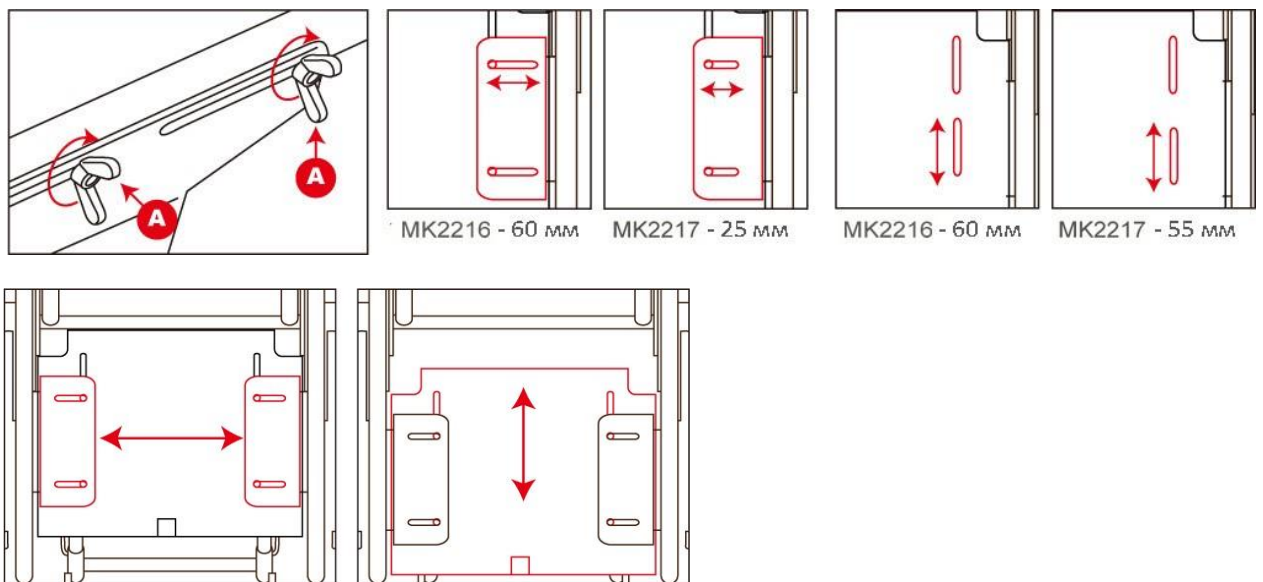


Щоб відрегулювати ширину і глибину сидіння, необхідно дістати подушку для сидіння і послабити гвинти А під сидінням.

УВАГА




Перш ніж повертати сидіння, дістаньте дитину з коляски.

6.8. Встановлення підголівника

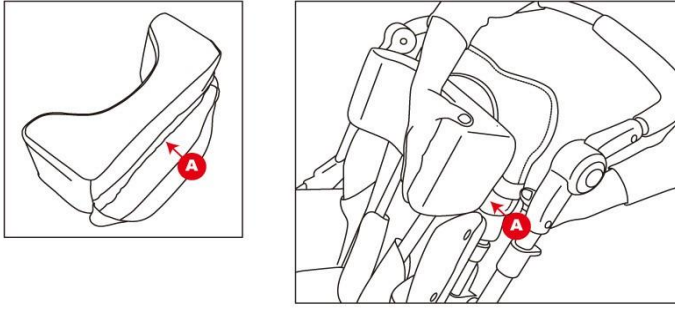


Встановіть підголівник А на спинку сидіння як показано на малюнку.

6.9. Регулювання кута нахилу і довжини підніжки

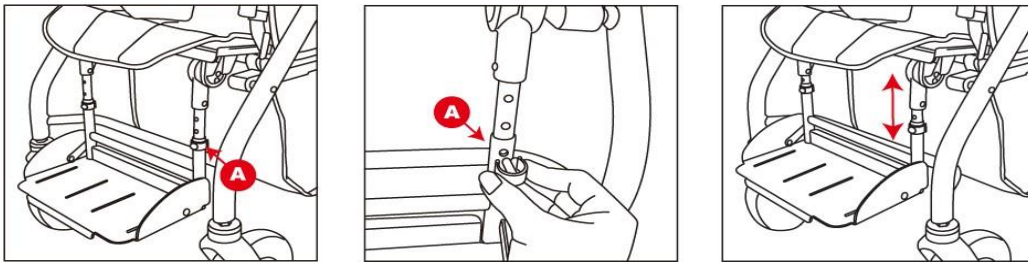

Вийміть затискачі А по обидва боки і встановіть підніжку на необхідну висоту.

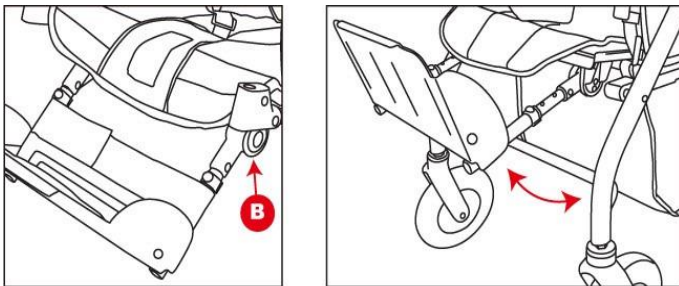


Для регулювання кута нахилу підніжки натисніть кнопку В.

УВАГА



Не використовуйте підніжку як важіль управління.

6.10. Гальма

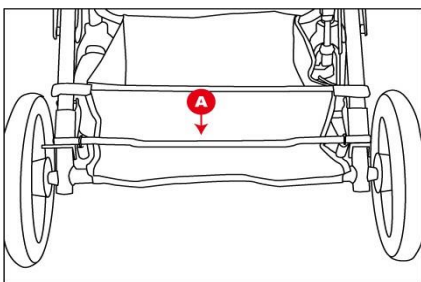

Щоб заблокувати коляску, необхідно наступити на задні гальма А.

7. Відомості про сертифікацію

Виріб «OSD-MK2218» відповідає технічним вимогам і визнаний придатним для експлуатації.



Виробник: Lerado Zhongshan Peaceful Cove Business Trading Co., Ltd. / Лерадо Жонгшан Пісфул Кове Бізнес Трейдінг Ко., Лтд.

No.26 Guangfu Road, Dongsheng Town, Zhongshan City, Guangdong Province, P.R.China / Но. 26 Гуангфу Род, Догшен Таун, Жонгшан Сіті, Гуандонг Провінсе, Китай.

Уповноважений представник виробника: ТОВ «ОСД Східна Європа»; адреса: Україна, 03127, м. Київ, пр. 40-Річчя Жовтня, 100/2.

Номер редакції: № 10 від 21.03.2019.

Дата виготовлення: див. на упаковці.

Гарантійний термін на виріб «OSD-MK2218» – 1 рік з дати продажу за умови виконання вимог Інструкції.

На частини, які швидко зношуються, гарантія не поширюється.

Доставка у сервісний центр та зворотня доставка здійснюється за рахунок клієнта.





8. Умови гарантії

ТОВ «ОСД Східна Європа» гарантує відсутність заводських дефектів і роботу пристрою протягом гарантійного терміну 12 місяців з дати купівлі при дотриманні правил експлуатації виробу, викладених у Інструкції.

1. Гарантійний ремонт проводиться **тільки** протягом гарантійного терміну.
2. Виріб знімається з гарантії у наступних випадках:
 - а) порушення правил експлуатації, викладених в Інструкції;
 - б) за наявності ознак стороннього втручання (спроба самостійного ремонту виробу);
 - в) якщо пристрій використовувався не за призначенням.
3. Гарантія не розповсюджується на:
 - а) механічні пошкодження чи пошкодження внаслідок транспортування;
 - б) пошкодження, які викликані потраплянням до виробу сторонніх предметів, речовин, рідин тощо;
 - в) пошкодження, які викликані побутовими факторами, зовнішніми діями (перепади напруги у мережі), неправильне підключення пристрою.
4. Споживач має право на обмін товару належної якості протягом 14 (чотирнадцяти) днів, не враховуючи дня купівлі згідно зі статтею 9 Закону України «Про захист прав споживачів»:

Обмін товару належної якості проводиться за умови, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд (складений в заводську упаковку), споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом із проданим товаром.

УВАГА: Артикул, технічні характеристики, колір, зовнішній вигляд та комплектація виробів можуть бути змінені виробником без попередження.

Дата продажу: _____

Підпис/Печатка: _____