



Крісло-каталка з санітарним оснащенням «SWINGER»

OSD-2004101

Інструкція з експлуатації



Дякуємо, що обрали нашу продукцію.
Уважно ознайомтеся з цією інструкцією та дотримуйтесь її під час використання.



Цей пристрій відповідає стандарту європейської Директиви 93/42/ЕЕС

ЗМІСТ

1. Вступ.....	3
2. Заходи безпеки	3
3. Технічні характеристики.....	4
4. Установлення	4
4.1. Установлення спинки для використання	5
4.2. Установлення поруччя.....	5
4.3. Установлення та використання сидіння.....	6
4.4. Установлення та використання санітарного оснащення.....	6
4.5. Установлення та використання коліс.....	7
4.6. Установлення та використання підніжок	7
4.7. Установлення та використання задніх коліс.....	8
5. Технічне обслуговування і догляд.....	8
6. Відомості про сертифікацію.....	9
7. Умови гарантії	10

1. Вступ

Дякуємо, що надали перевагу нашій продукції. Будь ласка, уважно ознайомтесь з цією Інструкцією та дотримуйтесь її під час використання виробу.



Не використовуйте крісло-каталку, не ознайомившись з Інструкцією.

Не використовуйте крісло-каталку у випадку її пошкодження.

Не намагайтеся внести зміни до конструкції виробу.

ТМ «OSD» гарантує використання високоякісних матеріалів та контроль виробництва на усіх його стадіях.

Крісло-каталка з санітарним оснащенням «OSD-2004101» (далі за паспортом – крісло-каталка / коляска) – це інноваційна коляска з ручним управлінням, яка може використовуватися для душу та туалету. Алюмінієва рама з порошковим покриттям стійка до дії зовнішніх чинників. Сидіння з відкидною кришкою у центрі, відро легко знімається ззаду. Коляска обладнана передніми поворотними колесами, діаметром 12 см, задніми швидкозмінними колесами, діаметром 60 см, з пластиковими спицями. Підніжки відкидні з регулюванням за висотою. Зручні алюмінієві гальма, відкидні м'які поруччя. М'які частини крісла виготовлені з водостійкого поліуретану. Коляска має відкидні поруччя і підніжку.

Коляска «OSD-2004101» розроблена для максимальної зручності та безпеки користувача. Розрахована для використання на вулиці та в житлових приміщеннях.

Даний виріб відповідає вимогам європейської Директиви 94/42/CEE виробів медичного призначення.

2. Заходи безпеки

Перед початком використання коляски або під час використання після тривалого зберігання переконайтеся, що всі частини коляски закріплені та міцно зафіксовані. Регулярно перевіряйте загальний технічний стан коляски: усі елементи з часом зношуються, особливо це стосується коліс, сидіння, підніжок та поруччя.

1. Максимально допустима вага опори 100 кг, **НІКОЛИ** не перевищуйте це навантаження.
2. Не намагайтеся вставати, сідати, робити кроки, підніматися, нахилитися самостійно: хтось завжди повинен вам допомагати.
3. Не використовуйте виріб на ескаляторах або рухомих доріжках.
4. Не нахиляйтеся, сидячи на кріслі-каталці, намагаючись дотягтися до чого-небудь, оскільки ви можете перевернутися!
5. Завжди перевіряйте стан та товщину коліс перед використанням крісла-каталки в душі.
6. Остерігайтеся будь-яких гарячих джерел, особливо цигарок, оскільки оббивний матеріал **НЕ**

ВОГНЕСТІЙКИЙ.

7. На разі використання виробу різними пацієнтами рекомендується систематично і ретельно мити та дезінфікувати коляску, щоб уникнути інфекцій.

ТМ «OSD» не гарантує безпеку користувачеві та правильне функціонування інвалідного візка за умов, якщо будь-який з оригінальних компонентів був змінений або замінений на неоригінальний.

3. Технічні характеристики

Параметр	Артикул
Модель:	OSD-2004101
Загальна ширина, (см):	61
Загальна висота, (см):	100
Ширина сидіння, (см):	40
Глибина сидіння, (см):	43
Висота спинки, (см):	40
Висота поруччя до сидіння, (см):	24,5
Висота сидіння від підлоги, (см):	52
Передні колеса, (дюйм):	5"
Задні колеса, (дюйм):	24"
Вага, (кг):	14
Максимальне навантаження, (кг):	100

4. Установлення


Правильний розподіл ваги тіла у колясці є запорукою легкого керування. Чим ближче центр ваги до задніх коліс, тим легше керувати коляскою. Значний вплив мають:

- будова тіла,
- постава,
- положення на сидінні,
- розміщення задніх коліс.

4.1. Установлення спинки для використання




1. Встановіть спинку в отвори у рамі (рис. 1).
2. Затягніть ручку, щоб переконатися, що спинка надійно зафіксована (рис. 2).

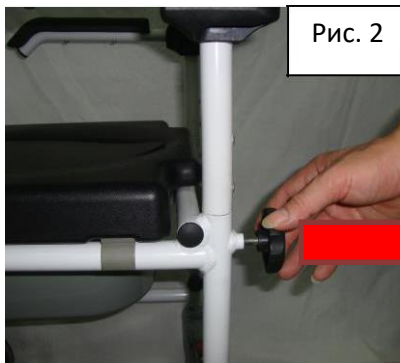

Ручка


4.2. Установлення поруччя

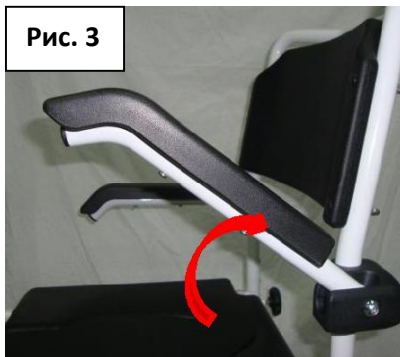

1. Поруччя можна підняти для поліпшення пересування користувача, у разі якщо його необхідно пересадити (рис. 3, 4).
2. Коли користувач сяде у крісло-каталку, опустіть поруччя та зафіксуйте їх, забезпечуючи опору для рук.




4.3. Установлення та використання сидіння

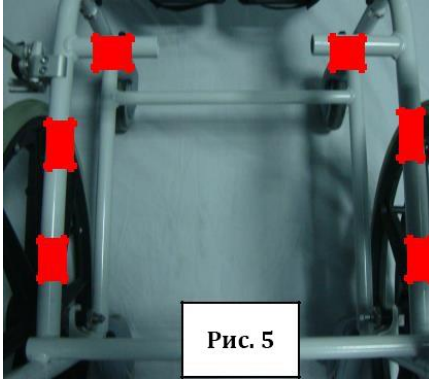


■ Місця для кріплення сидіння

1. Сидіння має 6 кріплень, які за допомогою легкого натиснення фіксуються на рамі і легко знімаються для очищення.
2. Натисніть у відповідному місці, як зображено на малюнку (рис. 5). Переконайтеся, що всі 6 кріплень щільно зафіксовані на рамі.

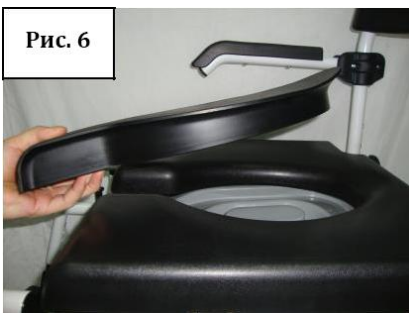


1. Кришка сидіння знімається (рис. 6).

4.4. Установлення та використання санітарного оснащення

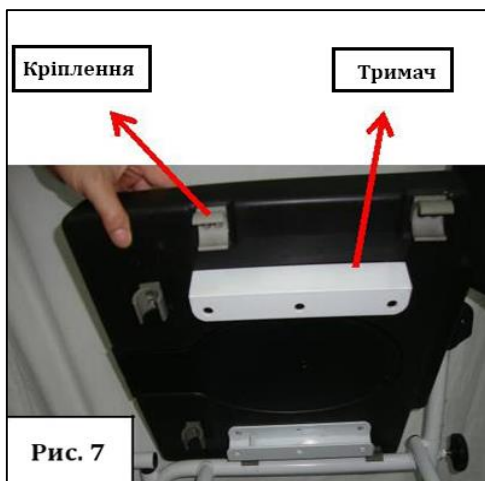

1. Переконайтеся, що відро правильно встановлено в тримач під сидінням (рис. 7).
2. Просуньте відро під сидіння до упору, щоб воно було зафіксоване (рис. 8).

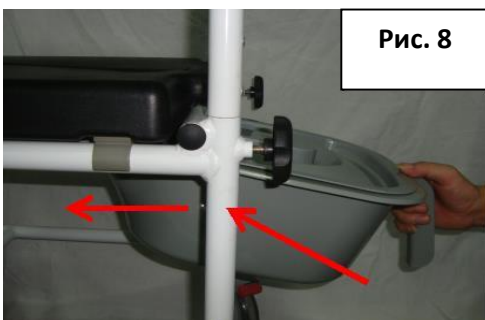


4.5. Установлення та використання коліс



Вище


Нижче

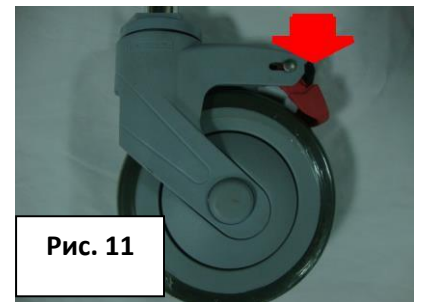


Кнопка

1. До ніжок крісла-каталки кріпляться чотири колеса. Усі колеса мають гальма.
2. Під час встановлення коліс, зверніть увагу на отвори для регулювання висоти (рис.9). Знайдіть зручне положення та зафіксуйте його (рис. 9 / 10). Переконайтеся, що всі колеса надійно зафіксовані на одній висоті.
3. Наступіть на червону педаль, щоб зафіксувати колесо (рис. 9).
4. Наступіть на чорну кнопку, щоб звільнити гальма (рис. 11).

4.6. Установлення та використання підніжок

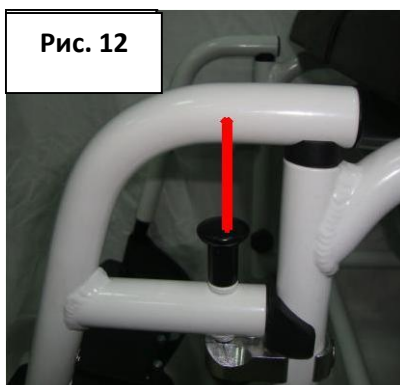

1. Потягніть вгору кнопку, щоб можна було рухати підніжки (рис. 12).
2. Коли користувач підвівся з крісла, підніжки можна розвести, або скласти (рис. 13 / 14).

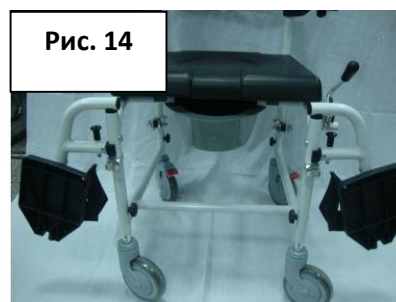

[7]

4.7. Установлення та використання задніх коліс

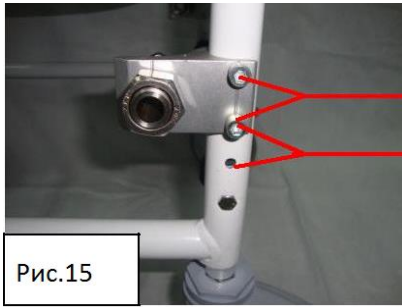


Рис.15

Вище
Нижче



Рис. 17

Гальма



Рис. 16

1. Установіть кріплення для задніх коліс до рами. Якщо потрібно збільшити висоту, закріпіть кріплення на два нижні отвори, якщо вище – на верхні (рис. 15).
2. Задні колеса можна швидко зняти за допомогою гвинта. Необхідно вставити гвинт так, щоб він проходив через вісь втулки і переконайтеся, що стопор кульки гвинта вийде у кінці (рис. 16).
3. Установіть гальмівну ручку на рамі. Для того, щоб переконатися, що гальма працюють і колеса не можуть більше обертатися (рис. 17).

5. Технічне обслуговування і догляд



УВАГА

Перевіряйте справність крісла-каталки перед кожним використанням, якщо коляска використовується не регулярно, то оглядайте мінімум раз на шість місяців. У разі поломки або несправності, пошкоджень або розривів одного або декількох деталей, НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ виріб.

Драпіровка та обшиті деталі

Деталі з обшивкою і покриттям виготовлені з поліуретану, тому коляска витримує вплив води та м'яких миючих засобів. Не використовуйте розчинники та абразивні препарати. Для видалення залишків води з поверхні крісла-каталки застосовуйте суху ганчірку. Якщо коляска використовується декількома людьми, то рекомендуємо систематично дезінфікувати, щоб уникнути інфекцій.

Рама та металеві частини

Завжди підтримуйте вашу коляску в чистоті для використання протягом тривалого терміну. Металеві частини очищайте за допомогою води та миючих засобів. Не використовуйте розчинники та абразивні препарати. Протирайте коляску ганчіркою після кожного використання.

Гальма

Гальма можуть змінювати свій стан залежно від стану шин, також на них негативно впливають бруд і сторонні предмети. Отже, часто перевіряйте гальмівний механізм. За необхідності використовуйте щітку для видалення бруду та сторонніх предметів (волосся та ін.). За поломки гальм зв'яжіться з механіком.

Колеса

Колеса виготовлені з міцного матеріалу, тому не вимагають додаткового догляду. Проте, їх слід періодично оглядати, щоб продовжити термін служби гальм.

6. Відомості про сертифікацію

Крісло-каталка з санітарним оснащенням «OSD-2004101» відповідає технічним вимогам і визнана придатною для експлуатації.



Виробник: Sichuan AST Medical Equipment Co., Ltd / Січуан АСТ Медікал Еквіпмент Ко., Лтд.

Area C, Chengxi Industrial Park, Lu County, Luzhou City, Sichuan Province, China / Ареа С, Схенгсі Індастріал Парк, Лу Соунті, Лужоу Сіті, Сісхуан Провітсу, Китай.

Уповноважений представник виробника в Україні: ТОВ «ОСД Східна Європа»; адреса: Україна, 03127, м. Київ, пр. 40-Річчя Жовтня, 100/2.

Номер редакції: № 5 від 05.03.2019.

Дата виготовлення: див. на упаковці.

Гарантійний термін на крісло-каталку «OSD-2004101» – 1 рік з дати продажу за умови виконання вимог Інструкції.

На частини, які швидко зношуються, гарантія не поширюється.

Доставка у сервісний центр та зворотня доставка здійснюється за рахунок клієнта.





7. Умови гарантії

ТОВ «ОСД Східна Європа» гарантує відсутність заводських дефектів і роботу пристрою протягом гарантійного терміну 12 місяців з дати купівлі при дотриманні правил експлуатації виробу викладених у Інструкції.

1. Гарантійний ремонт проводиться **тільки** протягом гарантійного терміну.
2. Виріб знімається з гарантії у наступних випадках:
 - а) порушення правил експлуатації, викладених в Інструкції;
 - б) за наявності ознак стороннього втручання (спроба самостійного ремонту виробу);
 - в) якщо пристрій використовувався не за призначенням.
3. Гарантія не розповсюджується на:
 - а) механічні пошкодження чи пошкодження внаслідок транспортування;
 - б) пошкодження, які викликані потраплянням до виробу сторонніх предметів, речовин, рідин тощо;
 - в) пошкодження, які викликані побутовими факторами, зовнішніми діями (перепади напруги у мережі), неправильне підключення пристрою.
4. Споживач має право на обмін товару належної якості протягом 14 (чотирнадцяти) днів, не враховуючи дня купівлі згідно зі статтею 9 Закону України «Про захист прав споживачів»:

Обмін товару належної якості проводиться за умови, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд (складений в заводську упаковку), споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом із проданим товаром.

УВАГА: Артикул, технічні характеристики, колір, зовнішній вигляд та комплектація виробів можуть бути змінені виробником без попередження.

Дата продажу: _____

Підпис/Печатка: _____