



## Надліжковий столик: OSD-AT1

### ВСТУП

Дякуємо, що надали перевагу нашій продукції. Будь ласка, уважно ознайомтесь з цією Інструкцією і дотримуйтесь її під час використання виробу.



**Не використовуйте виріб, не ознайомившись з Інструкцією.  
Не використовуйте виріб у випадку його пошкодження.  
Не намагайтеся внести зміни до конструкції виробу.**

ТМ «OSD» гарантує використання високоякісних матеріалів та контроль виробництва на усіх його стадіях.

Надліжковий столик «OSD-AT1» (далі за паспортом – виріб / столик) – рекомендований для застосування у медичних закладах.

Розроблено для максимальної зручності та безпеки користувача.

Даний виріб відповідає вимогам європейської Директиви 93/42/ЄЕС виробів медичного призначення.

### ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Перед початком використання виробу або під час використання після тривалого зберігання переконайтеся, що усі частини закріплені та міцно зафіксовані. Регулярно перевіряйте загальний технічний стан.

1. **ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ**, що виріб готовий до експлуатації та **НЕ ПОТРЕБУЄ** будь-якого технічного втручання або додаткової модернізації.
2. **ЗАВЖДИ** перевіряйте технічний стан виробу перед кожним використанням. **ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ**, що усі частини закріплені та міцно зафіксовані. **НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ** його у випадку зносу або пошкодження.
3. **НЕОБХІДНО** періодично оглядати виріб на стійкість.
4. **КОРИСТУВАЧАМ** з обмеженими фізичними можливостями **РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ** звертатися за допомогою до асистента.
5. **У ВИПАДКУ** використання виробу різними пацієнтами **РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ** систематично і ретельно мити та дезінфікувати його, щоб уникнути інфекцій.
6. **НЕ СИДІТЬ** на надліжковому столику.
7. **ПОВЕРХНЮ** надліжкового столика **ПОТРІБНО** протирати вологою тканиною. Засоби для чищення повинні бути м'якими. Можна використовувати побутові очисні засоби.

ТМ «OSD» не гарантує безпеку користувачеві та правильне функціонування виробу, якщо будь-який з оригінальних компонентів був змінений або замінений на неоригінальний.

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значення
Модель:	OSD-AT1
Матеріал:	пластмаса
Длина, (см):	90 – 107
Ширина, (см):	35
Висота, (см):	3
Гарантійний термін, (міс.):	12

### ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Стійкий надліжковий столик використовується у медичних закладах.
- Столик «OSD-AT1» встановлюється за допомогою 2 висувних регульованих кріплень безпосередньо над ліжком перед користувачем.
- Надліжковий столик виконаний з пластмаси. Регулюється за шириною у діапазоні від 90 до 107 см.
- За допомогою 2 пластмасових гачків, які знаходяться з тильного боку столика, його можна повісити на бічну опору ліжка.
- Обладнаний 2 підстаканниками для комфорту користувача.
- Підходить, як доповнення до функціональних медичних ліжок «OSD».

### ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ І ДОГЛЯД

Зовнішню поверхню виробу обробляйте дезінфікуючими засобами, зареєстрованими та дозволенними в Україні для дезінфекції поверхонь за режимами, регламентованими діючими документами стосовно застосування дезінфікуючих засобів, затвердженими в установленому порядку.

Завжди тримайте виріб у чистоті для використання протягом тривалого терміну. Очищайте за допомогою води та м'яких засобів. Не використовуйте розчинники та абразивні препарати. Протирайте виріб сухою ганчіркою після кожного використання.

**ПРИМІТКА:** Підприємство-виробник систематично веде роботи з поліпшення конструкції виробу, тому можливі деякі зміни, не зазначені в Інструкції.



**Перевіряйте належну якість виробу перед кожним використанням, якщо обладнання використовується не регулярно, то оглядайте його мінімум раз на рік. У разі поломки або несправності, пошкодження або розривів одного або декількох деталей, НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ виріб.**

### УМОВИ ГАРАНТІЇ

ТОВ «ОСД Східна Європа» гарантує відсутність заводських дефектів і роботу пристрою протягом гарантійного терміну 12 місяців з дати купівлі при дотриманні правил експлуатації виробу викладених у Інструкції.

1. Гарантійний ремонт проводиться тільки протягом гарантійного терміну.
2. Виріб знімається з гарантії у наступних випадках:
  - а) порушення правил експлуатації, викладених в Інструкції;
  - б) за наявності ознак стороннього втручання (спроба самостійного ремонту виробу);
  - в) якщо пристрій використовувався не за призначенням.
3. Гарантія не розповсюджується на:
  - а) механічні пошкодження чи пошкодження внаслідок транспортування;
  - б) пошкодження, які викликані потраплянням до виробу сторонніх предметів, речовин, рідин тощо;
  - в) пошкодження, які викликані побутовими факторами, зовнішніми діями (перепади напруги у мережі), неправильне підключення пристрою.
4. Споживач має право на обмін товару належної якості протягом 14 (чотирнадцяти) днів, не враховуючи дня купівлі згідно зі статтею 9 Закону України «Про захист прав споживачів»:

*Обмін товару належної якості проводиться за умови, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд (складений в заводську упаковку), споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом із проданим товаром.*

**УВАГА: Артикул, технічні характеристики, колір, зовнішній вигляд та комплектація виробів можуть бути змінені виробником без попередження.**

Дата продажу: \_\_\_\_\_

Підпис/Печатка: \_\_\_\_\_

### ВІДОМОСТІ ПРО СЕРТИФІКАЦІЮ

**Виріб «OSD-AT1»** відповідає технічним вимогам і визнаний придатним для експлуатації.



**Виробник:** Zhongshan Aolike Medical Equipment Technology Co., Ltd. / Жонгшан Аолик Медікал Еквіпмент Технолоджі Ко., Лтд.  
No. 51, West Donghai Rd, Dongfeng Town, Zhongshan, Guangdong Province, 528425, P.R. China / No. 51, Вест Донгхай Рд, Донгфенг Товн, Зхонгсхан, Гуангдонг Провінсе, 528425 П.Р. Китай.

**Уповноважений представник виробника в Україні:** ТОВ «ОСД Східна Європа»; адреса: Україна, 03127, м. Київ, пр. 40-Річчя Жовтня, 100/2.

**Номер редакції:** № 2 від 30.01.2019.

**Дата виготовлення:** див. на упаковці.

**Термін придатності виробу:** необмежений.

**Гарантійний термін на виріб «OSD-AT1»** – 12 місяців з дати продажу за умови дотримання правил експлуатації виробу, зазначених у Інструкції.

