



Стілець-туалет

OSD-2108D

Інструкція з експлуатації



Дякуємо, що обрали нашу продукцію.
Уважно ознайомтеся з цією інструкцією та дотримуйтесь її під час використання.



Цей пристрій відповідає стандарту європейської Директиви 93/42/ЄЕС

ЗМІСТ

1. Вступ.....	3
2. Заходи безпеки	3
3. Технічні характеристики.....	4
4. Загальна характеристика.....	4
5. Технічне обслуговування і догляд.....	5
6. Позначення.....	5
7. Комплектація	5
8. Відомості про сертифікацію.....	6
9. Умови гарантії	7

1. Вступ

Дякуємо, що надали перевагу нашій продукції. Будь ласка, уважно ознайомтесь з цією Інструкцією та дотримуйтесь її під час використання виробу.



Не використовуйте стілець-туалет, не ознайомившись з Інструкцією.

Не використовуйте стілець-туалет у випадку його пошкодження.

Не намагайтеся внести зміни до конструкції виробу.

ТМ «OSD» гарантує використання високоякісних матеріалів та контроль виробництва на усіх його стадіях.

Стілець-туалет «OSD-2108D» (далі за паспортом – стілець-туалет) – рекомендований для застосування у медичних закладах та вдома людям з частковою втратою функцій опорно-рухового апарату. Використовується як пересувне санітарно-гігієнічне обладнання, яке не розраховане для транспортування пацієнтів.

Стілець-туалет «OSD-2108D» розроблений для максимальної зручності та безпеки користувача. Розрахований для використання у житлових приміщеннях.

Даний виріб відповідає вимогам європейської Директиви 94/42/ЄЕС виробів медичного призначення.

2. Заходи безпеки

Перед початком використання стільця-туалету або під час використання після тривалого зберігання переконайтеся, що всі частини закріплені та міцно зафіксовані. Регулярно перевіряйте загальний технічний стан.

1. За умов зміни положення центру ваги за рахунок зміщення тіла або через зміну навантаження на стілець-туалет, а також нахилу на кут більше 10 градусів, підвищується можливість перекидання.
2. **НЕ** залишайте користувача у стільці-туалеті без нагляду.
3. Установлюйте стілець-туалет на рівну горизонтальну поверхню.
4. Асистент повинен:
 - ✓ перевірити належну якість стільця-туалету;
 - ✓ попереджати користувача про свої дії, особливо під час нахилу стільця-туалету;
 - ✓ **НЕ** нахилити стілець-туалет уперед.
5. Максимально допустиме навантаження на стілець-туалет – 136 кг. **НИКОЛИ** не перевищуйте допустимий ліміт ваги!
6. **НЕ** намагайтеся вставати, сідати, робити кроки, підніматися, нахилитися самостійно: хтось завжди повинен вам допомагати.
7. **НЕ** нахиляйтеся, сидячи у стільці-туалеті, намагаючись дотягтися до чого-небудь, оскільки ви

можете перевернутися!


8. На разі використання виробу різними пацієнтами рекомендується систематично і ретельно мити та дезінфікувати стілець-туалет, щоб уникнути інфекцій.

ТМ «OSD» не гарантує безпеку користувачеві та правильне функціонування стільця-туалету, якщо будь-який з оригінальних компонентів був змінений або замінений на неоригінальний.

3. Технічні характеристики

Параметр	Значення
Модель:	OSD-2108D
Ширина сидіння, (см):	47
Висота сидіння, (см):	42-57
Вага, (кг):	8,5
Максимальне навантаження, (кг):	136

4. Загальна характеристика

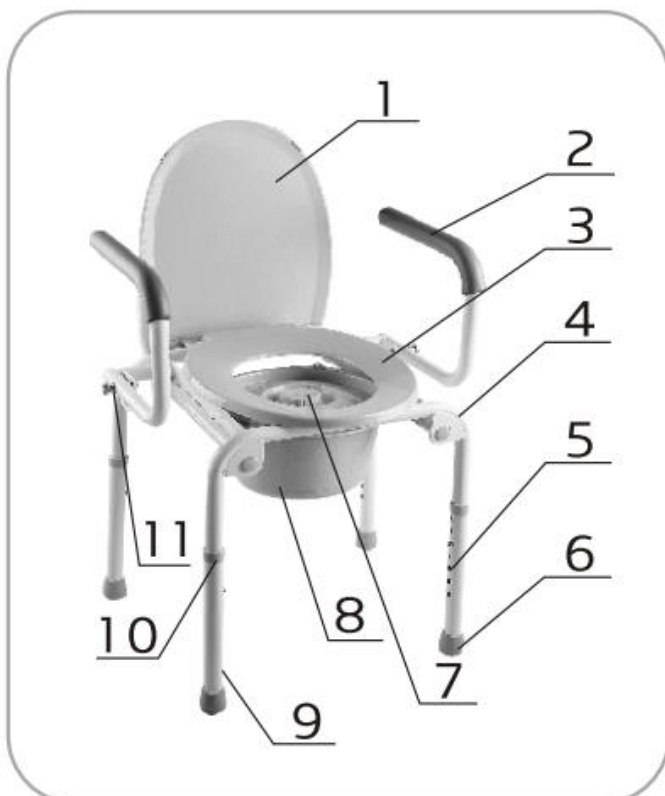

- 1 – Кришка
- 2 – Поруччя
- 3 – Сидіння
- 4 – Рама
- 5 – Ніжка
- 6 – Наконечник
- 7 – Кришка для відра
- 8 – Відро
- 9 – Кнопковий фіксатор
- 10 – Регулювальник за висотою
- 11 – Фіксатор для відкидного поруччя

[4]

- ✓ Поруччя стільця-туалету – відкидні. Матеріал накладок – пластмаса.
- ✓ Рама стільця-туалету виготовлена зі сталі, відрізняється міцністю та стійкістю конструкції.
- ✓ Висота стільця-туалету регулюється кнопковим фіксатором.
- ✓ Ніжки стільця-туалету обладнані гумовими протиковзкими наконечниками.
- ✓ Сидіння та санітарне обладнання – знімні, виготовлені з гігієнічної пластмаси.

5. Технічне обслуговування і догляд



Перевіряйте справність стільця-туалету перед кожним використанням, якщо обладнання використовується не регулярно, то оглядайте його мінімум раз на шість місяців. У разі поломки або несправності, пошкоджень або розривів одного або декількох деталей, **НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ** виріб.

Зовнішні поверхні стільця-туалету обробляйте дезінфікуючими засобами, зареєстрованими та дозволеними в Україні для дезінфекції поверхонь за режимами, регламентованими діючими документами стосовно застосування дезінфікуючих засобів, затвердженими в установленому порядку.

Завжди тримайте стілець-туалет у чистоті для використання протягом тривалого терміну. Металеві частини очищайте за допомогою води та м'яких засобів. Не використовуйте розчинники та абразивні препарати. Протирайте стілець-туалет ганчіркою після кожного використання.

6. Позначення

Символ	Значення	Символ	Значення
	Угору		Крихкий
	Зберігайте сухим		Символ, що позначає неправильну експлуатацію, яка може завдати шкоди користувачеві або виробу

7. Комплектація

1. Стілець-туалет 1 шт.
2. Інструкція..... 1 прим.

ПРИМІТКА: Підприємство-виробник систематично веде роботи з поліпшення конструкції стільця-туалету, тому можливі деякі зміни, не зазначені в Інструкції.

8. Відомості про сертифікацію

Стілець-туалет «OSD-2108D» відповідає технічним вимогам і визнаний придатними для експлуатації.



Виробник: Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co., Ltd /

Джангсу Юю Медікал Еквіпмент енд Сапплай Ко., Лтд.

Yunyang Industrial Park, Danyang City, Jiangsu Province, China /

Юньянґ Індастріал Парк, Даньянґ Сіті, Джангсу Провінс, Китай.

Уповноважений представник виробника в Україні: ТОВ «ОСД Східна Європа»; адреса: Україна, 03127, м. Київ, пр. 40-Річчя Жовтня, 100/2.



Номер редакції: № 5 від 05.03.2019.

Дата виготовлення: див. на упаковці.

Гарантійний термін на **стілець-туалет «OSD-2108D»** – 1 рік з дати продажу за умови виконання вимог Інструкції.

На частини, які швидко зношуються, гарантія не поширюється.

Доставка у сервісний центр та зворотня доставка здійснюється за рахунок клієнта.



9. Умови гарантії

ТОВ «ОСД Східна Європа» гарантує відсутність заводських дефектів і роботу пристрою протягом гарантійного терміну 12 місяців з дати купівлі при дотриманні правил експлуатації виробу викладених у Інструкції.

1. Гарантійний ремонт проводиться **тільки** протягом гарантійного терміну.
2. Виріб знімається з гарантії у наступних випадках:
 - а) порушення правил експлуатації, викладених в Інструкції;
 - б) за наявності ознак стороннього втручання (спроба самостійного ремонту виробу);
 - в) якщо пристрій використовувався не за призначенням.
3. Гарантія не розповсюджується на:
 - а) механічні пошкодження чи пошкодження внаслідок транспортування;
 - б) пошкодження, які викликані потраплянням до виробу сторонніх предметів, речовин, рідин тощо;
 - в) пошкодження, які викликані побутовими факторами, зовнішніми діями (перепади напруги у мережі), неправильне підключення пристрою.
4. Споживач має право на обмін товару належної якості протягом 14 (чотирнадцяти) днів, не враховуючи дня купівлі згідно зі статтею 9 Закону України «Про захист прав споживачів»:

Обмін товару належної якості проводиться за умови, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд (складений в заводську упаковку), споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом із проданим товаром.

УВАГА: Артикул, технічні характеристики, колір, зовнішній вигляд та комплектація виробів можуть бути змінені виробником без попередження.

Дата продажу: _____

Підпис/Печатка: _____