

## Інструкція з використання компресійних виробів Sanyleg™

Гольфи: Арт. P21,P22,B12,M31,M32,T41,T41PC,H62

Панчохи: Арт. P23,M33, T42,T42PC,SANH61N

Колготки: Арт. P24,M34, T43,T43PC

140 DEN 15-21 мм рт.ст – Середня компресія рекомендується для терапії легкої хронічної венозної недостатності, варикозу, набряків та вагітним жінкам.

280 DEN 25-27 мм рт.ст – Висока компресія для терапії венозної недостатності, варикозу, флебітів, для післяопераційної терапії та профілактики тромбозів.

2 клас компресії 23-32 мм рт.ст - При виражених проявах варикозної хвороби, для лікування варикозного розширення вен, для профілактики тромбозу глибоких вен, реабілітація після операції з видалення вен.

### Як правильно надягати компресійні вироби Sanyleg™

Надягати компресійні вироби необхідно у горизонтальному положенні, не встаючи з ліжка, поки немає скупчення крові у венах та набряків, або після 20 хв відпочинку ніг у піднятому положенні. Дотримання цього правила дозволить домогтися максимального ефекту від лікування.

Безпосередньо перед одяганням трикотажу слід виконати деякі підготовчі заходи, які значно полегшать саму процедуру:

- Нігті повинні бути акуратно оброблені (підстрижені, підпиляні).
- Зняти з пальців прикраси, щоб запобігти розривам та іншим пошкодженням компресійних виробів.
- Якщо людина вперше одягає компресійний трикотаж, то краще скористатися гумовими рукавичками, які вбережуть річ від розриву при натягуванні та допоможуть рівномірно розподілити виріб по нозі;
- Якщо є мозолі або інші нерівності на стопах, то потрібно їх попередньо згладити. Це необхідно для запобігання утворення затяжок.
- Панчохи і шкіра повинні бути абсолютно сухими.

Існують кілька способів, як правильно одягнути компресійні панчохи.

1 спосіб:

- Обережно зберіть виріб від верхньої частини до носка.
- Вставте вашу ступню у відповідну частину виробу.
- Правильно зафіксуйте п'ятку та носок виробу.
- Використовуючи долоні, обережно, з невеликим зусиллям розподіліть виріб від щиколотки до коліна. Ніколи не тягніть виріб за верхню резинку.
- Зробіть те ж саме для другої ноги.

2 спосіб:

- Панчохи вивертаються навиворіт до п'ят.
- Біля п'яти вивертаються ще раз – робиться манжетка.
- Вставляється нога в слід і розправляється матеріал.
- Далі натягується виріб по нозі, при цьому одночасно вивертається назовні.
- На завершальному етапі необхідно розправити панчохи від стоп до стегна, паралельно розрівнюючи складочки.

**ВАЖЛИВО:** Розподіляти виріб потрібно поступово та рівномірно з самого низу, щоб не було складок на гомілці і під коліном;

Під час надягання чи знімання виробу не тягнути за резинку, основна функція якої – фіксація;

Під час надягання виробу необхідно правильно зафіксувати п'ятку та носок;

Для панчіх та колгот важливо обережно розподілити виріб до паху, уникаючи перекручувань; Якщо це панчохи, не можна тягнути виріб за силіконову стрічку;

Для колгот – обережно розподілити виріб вгорі таким чином, щоб передній та задній шви були цілком вертикальні.

## Правила догляду за медичним компресійним трикотажем

Перед першим використанням рекомендується гігієнічне прання в теплій воді.

Прати необхідно щодня, так як між нитками виробу накопичується пил та піт, що призводить до їх перетирання та втраті лікувальних властивостей і швидкому зношуванню продукції.

Прати виріб необхідно вручну, вивернувши навиворіт, в мильній воді при температурі до 40°C без агресивних засобів. Ретельно прополіскувати у чистій воді.

Не викручувати, віджати у рушнику ( не скручуючи) та сушити краще в горизонтальному положенні при кімнатній температурі. На батареї та інших нагрівальних приладах не сушити.

### Кип'ятити та прасувати компресійний трикотаж не можна!

Будь-яка хімічна чи термічна обробка виробу призводить до втрати лікувальних властивостей компресійного трикотажу та його псування. Силіконові стрічки на панчохах необхідно оберегти від тривалого впливу води та миючих засобів. Для підтримки «клейких» властивостей протирайте їх бавовняною тканиною, змоченою спиртовим розчином.

Заборонено зрізати технологічні нитки на виворотній стороні, інакше на місці можуть одразу з'явитися дірки та стрілки.



#### Умови зберігання:

35°C



Зберігати при температурі від 1°C до 35 °C в недоступному для дітей місці

1°C

Гарантійний термін експлуатації: 1 місяць на виробничі дефекти, а не неправильне використання



**Sanyleg S.r.l a Socio Unico**

**Via Albania 1/3,**

**446042 Castel Goffredo**

**(MN) Italy**

#### «Санілег ЕсЕрЕл е Соціо Юніко»

Вулиця Албанія 1/3

446042 Кастель Гоффредо

(МН) Італія

[www.sanyleg.com](http://www.sanyleg.com)

[export@sanyleg.com](mailto:export@sanyleg.com)

#### Уповноважений представник на території України:

ТОВ «Волсмайт»

вулиця Ковельська, будинок 1-А,

село Козин, Рожищенський район,

Волинська область, 45123, Україна



**ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ № 2В/2022 від 04.08.2022р.**

Номер редакції: №1 від 19.09.2022 р.